

СПРИНЦОВКА ПЛАСТИЗОЛЬНАЯ

ТИП А номер 3 (110±20 мл)

Зарегистрировано под названием «Спринцовки пластизольные «Виталфарм».
Предназначена для использования в медицинской практике и в быту, в том числе для ирригации (орошения).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Перед первым применением баллон прополоскать водой изнутри несколько раз. Затем погрузить баллон в сосуд с водой, довести до кипения, выдержать в кипящей воде 30 (±5) минут, дать полностью остыть. Перед спринцеванием наконечник смазать нейтральным жиром (вазелином, ланолином). После применения спринцовку рекомендуется промыть и продезинфицировать. Спринцовка не должна контактировать с лекарственным средством более 30 минут. Нетоксично. Противопоказания отсутствуют. Спринцевание проводить по назначению специалиста.

Условия хранения: от +5°C до +40°C, относительной влажности до 70% при +25°C. Спринцовка не должна подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, бензина и других растворителей. **ВНИМАНИЕ!** Спринцовку для маслосодержащих средств не применять! Не использовать для очистки глаз и ушей ребенка! Утилизировать как бытовые отходы.

ТУ 9464-005-50887801:2008;

ПУ № ФСП 2008/03467 от 18.04.2013 г.

Не подлежит обязательной сертификации.